

Kratkotrajno čuvanje i transport kultura *N. meningitidis*, *S. pneumoniae* i *H. influenzae*

- Nakon inkubacije od 18-24h, na 35°C na odgorajućoj podlozi i u prisustvu 5-10% CO₂, bakterijska kultura se čuva u frižideru (ne na sobnoj temperaturi)
- **do 3 dana - krvni agar i čokoladni agar (oblepljen selotejpom, zbog sušenja) na +4°C**
- do nedelju dana - duboki krvni/čokoladni agar sa kosinom
napomena-pneumokok se mora presejavati svaki drugi dan zbog autolize



Transport na 25°C

Slanje bakterijske kulture u Amies/Stuart transportnim podlogama

- koristi se čista, sveža 18-24 časovna bakterijska kultura
- sterilnim brisom iz originalnog pakovanja se „pokupi“ kulturapneumokoka sa podloge
- bris se uroni u transportnu podlogu, zatvori, zapakuje i šalje
- zbog problema sa kontaminacijom sa transportne podloge, bilo bi dobro da se **uz transportni medijum sa kulturom, pošalje i kultura na krvnom agaru**
- uz kulturu se šalje i uputnica NRL, koja sadrži važne podatke o pacijentu i soju
- slanje: brzom poštom, lično, putem auta zavoda ili bolnice koja dolaze u Beograd

